



广工牌医用超声耦合剂，作为超声波
检查与治疗之用的高质量凝胶，能充分
润湿皮肤，保证超声波的良好穿透，完
全水溶性不损坏探头，也不刺激皮肤。

使用时将凝胶直接涂于探头或检查
部位，检查完毕用毛巾或纸巾擦除。

注意：仅用于完好皮肤，不得用于创口
和粘膜。

生产备案号：粤穗食药监械生产备20180148¹

产品备案号：粤穗械备20181017号

200g

广州广工技术开发有限公司

地址：广州市天河区宦溪北路27号411房
电话：020-22308397